


MASQUES CATÉGORIE

UNS1

enregistrement DGA 20-3024

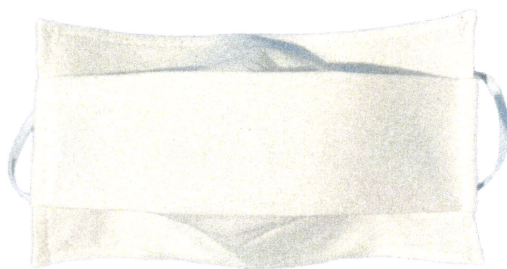

Nos masques barrières sont composés de **4 couches** :

- **2 couches externes** : Tissu poly-coton 120 g/m² (35% polyester, 65% coton)
- **2 couches internes** : Polypropylène non-tissé 50 g/m²

COLORIS DIVERS, SELON DISPONIBILITÉ DES STOCKS DE TISSUS.

Valeurs aux tests (rapport DGA RP/20-3024/DGA MNRBC/2000305/NP):

- Respirabilité - perméabilité à l'air (>96 pour dépression de 100 Pa) : **355 L/m².s⁻¹**
- Efficacité de filtration des particules de 3 µm émies (>70%) : **98.0%**

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

AVERTISSEMENT : Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières qui sont essentiels. (<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>)

MODE D'EMPLOI :

- Avant la 1^{ère} utilisation, et entre chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine, à 60°C pendant 30 min minimum, essorage 400 tr/min maximum et passage au sèche-linge.
- Avant de mettre un masque ou après avoir touché un masque usager se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; Une fois correctement appliqué, viter de toucher ou déplacer le masque.
- Changer le masque toutes les 4 heures, ou lorsque le masque devient humide ; Retirer le masque en l'enlevant par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque) ; Après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage, ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas d'un sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac.
- Testé à 10 lavages en catégorie 1.
- Pas de blanchiment / Pas de nettoyage à sec.
- Utiliser un filet de lavage pour disposer le masque lors du lavage.

Le port du masque barrière permet de limiter la projection de particules de la bouche ou le nez vers l'extérieur du masque.